


CliniView program CD Viewer Uputstvo


1. Ubaciti CD u Vaš CD-ROM čitač i nakon automatskog pokretanja programa, odabrati snimke za pregled:

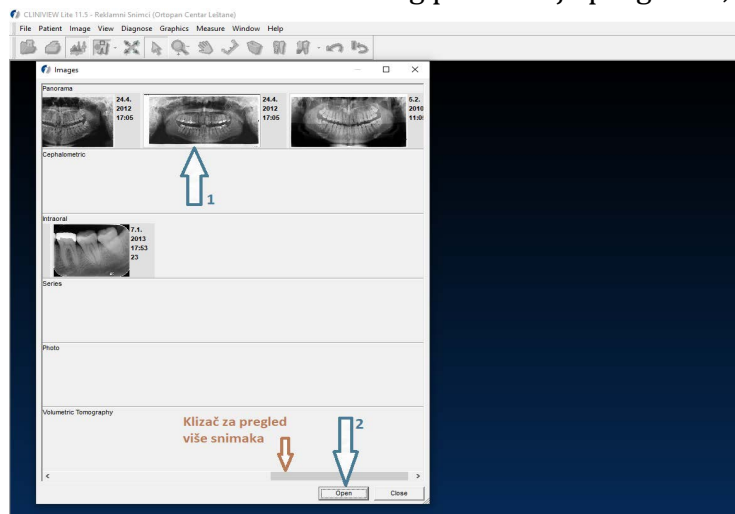

Ukoliko u Windows-u nije aktivirana opcija „autorun“ za automatsko pokretanje CD-a, neophodno je da se program startuje pokretanjem fajla: „CVLite.exe“ koji se nalazi na CD-u:

Name	Date	Type	Size	Tags
Autorun.inf	1.10.2020. 09:31	Setup Information	1 KB	
CVLite.exe	16.4.2018. 16:27	Application	29.832 KB	
CVLiteHelp.pdf	16.4.2018. 13:43	Adobe Acrobat D...	11 KB	
FnpFlxLib.dll	16.4.2018. 13:43	Application exten...	1.259 KB	
ImageOps.dll	16.4.2018. 13:43	Application exten...	279 KB	
Snimci_Reklamni_In...	1.10.2020. 09:30	PNG File	232 KB	
Snimci_Reklamni_In...	1.10.2020. 09:30	JPG File	19 KB	

2. Nakon otvaranja željenog snimka (ili više snimaka), u okviru CliniView programa možete vršiti obradu, dijagnostiku, merenja i eventualno štampanje snimka:

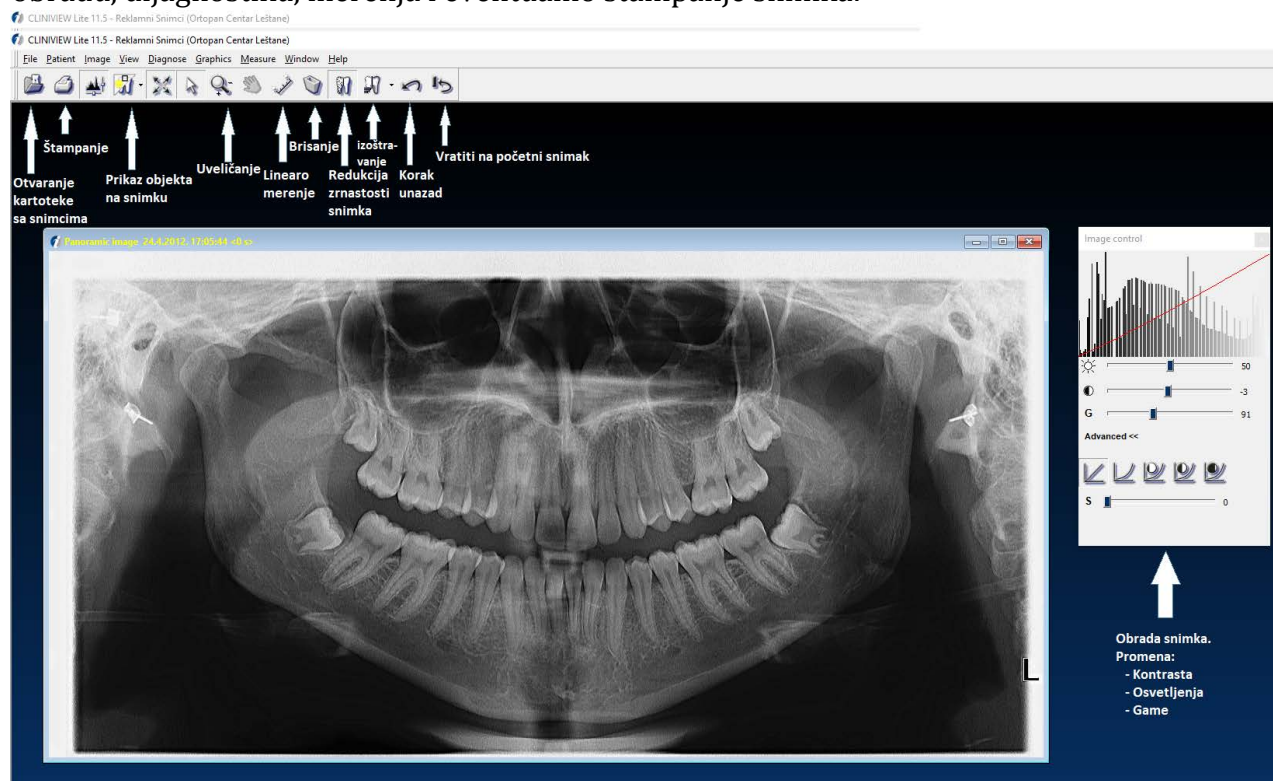

Obrada snimka.
Promena:
- Kontraste
- Osvetljenja
- Game



CliniView Lite Program

Cliniview Lite je pregledni program za stomatološke radiološke snimke. Omogućuje pregled, obradu, merenja, dijagnostiku i štampanje stomatoloških ekstraoralnih i intraoralnih snimaka kao i fotografija.

Отварање снимака

Sa *CliniView Lite* možemo otvoriti panoramske, kefalometrijske, intraoralne snimke kao i fotografije. Svi urađeni snimci iz Ortopan centra Leštane se mogu otvoriti pomoću *Cliniview lite* preglednog programa. Svi snimci se nalaze u folderu: „image folder“ na disku i svaki modalitet ima svoju kategoriju. Informacije o snimku se mogu videti kada se kursor miša postavi na snimak, prilikom otvaranja programa (slika 1 na prethodnoj strani). Takođe u programu se mogu videti i informacije o pacijentu, ukoliko su uneseni od strane rendgen centra. Promena ili merenja koja se izvrše na snimku se ne mogu sačuvati u *Cliniview Lite* programu jer je on samo pregledni program. Takođe, brisanje snimaka nije omogućeno.

Rad i obrada snimka

Cliniview Lite sadrži alate za obradu snimaka. Postoje dijagnostičke alate kao što su: zoom, kontrola kontrasta i osvetljenja, redukcija zrnastosti, izoštravanje, korak unazad itd (slika 3 na prethodnoj strani). „Image control“ prozor mora biti otvoren u programu za obradu snimka. On poseduje histogram koji prikazuje distribuciju prikaza nivoa sive boje na snimku („grayscale“). Takođe postoje alate za štampanje, brisanje postavljenih objekata i alatka za linearna merenja.

Svi snimci koji se dobiju iz Ortopan centra Leštane su kalibrisani tako da sva linearna merenja odgovaraju stvarnim dimenzijama u ustima pacijenta.

Cliniview Lite takođe može prikazati postavljene modele implantata i drugih objekata ukoliko su zatraženi od Ortopan centra.

Ukoliko je snimak procesuiran (obrađen), slovo „P“ u donjem desnom uglu ekrana programa je markirano/zadebljano. Dolaskom miša na njega videćemo spisak primenjenih alati na snimak (spisak obrade na snimku).

Sadržaj CD-a se može iskopirati na hard disk kompjutera i tada se program brže odaziva. Takođe, u tom slučaju se disk ne mora čuvati.

Štampanje

Cliniview Lite omogućuje štampanje snimaka. Klikom na ikonicu štampača (slika 3 na prethodnoj strani) otvara se „Print Editor“. U njemu možemo štampati otvorene slike onako kako se vide na ekranu. Ako su crteži ili merenja vidljivi na snimku, oni će se takođe odštampati. Informacije o snimku kao i beleške mogu se dodati na papir sa snimkom. U print editoru postoje alate kao što su zumiranje, prilagođavanje stranici, vraćanje veličine slike, podešavanje stranice i dijalog za podešavanje zaglavlja i podnožja. Pomoću podešavanja stranice korisnik može promeniti vrstu papira, širinu, visinu, orijentaciju i merne jedinice. Korišćenjem podešavanja zaglavlja i podnožja možete definisati tekst informacija za zaglavlje i/ili podnožje. Stavke koje treba dodati su npr. ime pacijenta, datum i vreme itd.

Kopiranje

Cliniview Lite može kopirati snimak u privremenu memoriju (*clipboard*). Snimci se mogu kopirati bilo kako su prikazani na ekranu ili sa njihovom stvarnom veličinom. Takođe će se kopirati sve promene kao što su osvetljenje, kontrast itd. *Cliniview Lite* takođe ima funkciju za promenu jezika. Da biste promenili jezik, izaberite *File* i zatim željeni jezik sa liste.

